

Anleitung für die individuelle Anpassung unserer Masken

Bild 1



Hier die offene Maske mit Bändern oben und unten.

So erhalten Sie die Maske von uns.

Bild 2



1. Machen Sie an den unteren Bändern dicht an der Maske einen offenen Knoten.

Bild 3



2. Ziehen Sie jetzt das obere Band durch den offenen Knoten und ziehen diesen ein wenig fest.

Bild 4



3. Setzen Sie jetzt die Maske zur Anprobe auf.
4. Ziehen Sie an den durchgeführten Bändern bis zur gewünschten Einstellung

Bild 5



5. Jetzt ziehen Sie den Knoten fest an.
6. Zum Schluß verknoten Sie das obere mit dem unteren Band und schneiden den Rest ab.

Bild 6



- Nun haben Sie ein Maske nach Ihrer Größe.
7. Das untere Band wird noch um den Hals gebunden, damit die Maske nicht verloren geht.

Bleiben Sie gesund !

